

入门指南

PCEye 5




tobii dynavox

装箱清单

- ① PCEye 5 眼控仪
- ② 入门指南
- ③ 磁性安装贴片
- ④ 安装贴片清洁包

- ⑤ 安全与合规文件
- ⑥ 便携包
- ⑦ USB-C 转 USB-A 转接头
- ⑧ 保修卡

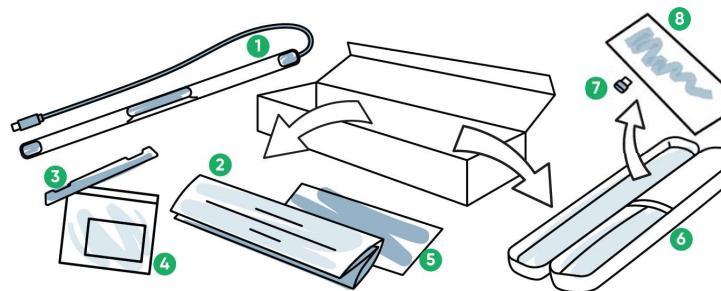

了解您的设备


- ① 眼控仪
- ② USB 接口

- ③ 安装刻度
- ④ 磁性凹槽


扫描二维码以获取
更多关于PCEye 5
眼控仪的资源



扫描二维码以观
看PCEye 5的操
作指导视频

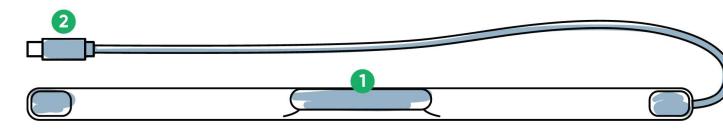

正面

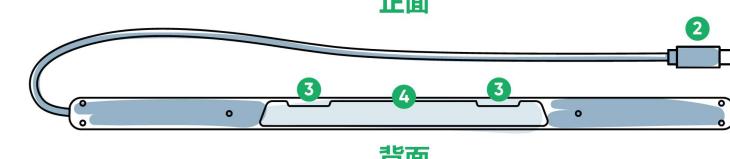

背面

安装

步骤1：安装PCEye5软件

访问 https://learnaac.cn/download_control 下载安装文
件，下载完成后运行.exe文件，按照提示完成安装。



步骤2：安装PCEye5眼控仪硬件

遵照屏幕上的提示，将PCEye5眼控仪与您的计算机进行连
接。请扫描二维码，观看安装指导视频。



 如果您使用的是平板电脑，您需要另外购买配套的安装支架。

步骤3：安装沟通软件（选装）

如果您购买的套装包含沟通软件，请进行下载并使用您的许可证号激活软
件。

如果您购买的套装不包含沟通软件，可下载软件进行试用，如需长期使用
需要单独购买激活码。

了解和下
载
TD Snap沟
通
软
件



<https://learnaac.cn/tdsnap>

了解和下
载
C5沟
通
软
件



<https://learnaac.cn/communicator5>

开始使用PCEye5眼控仪



打开眼控软件 TD Control，它将为您提供鼠标与键盘的功能，从而实现用眼睛控制电脑。
首次运行TD Control时，快速入门指南将会概括介绍各项操作。



您可以通过选择信息按钮 打开“快速入门指南”。



选择“隐藏指南”退出。

追踪圈

TD Control启动后，屏幕上会出现一个半透明的圆圈——追踪圈，它会跟随您的目光而移动。



当您注视屏幕上某个目标时，将会出现一个“小太阳”形状的按钮，注视“小太阳”按钮，会打开操作菜单。

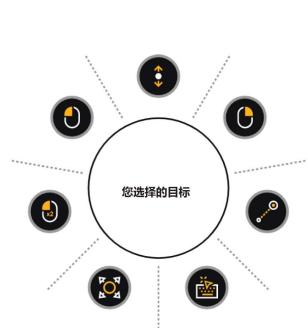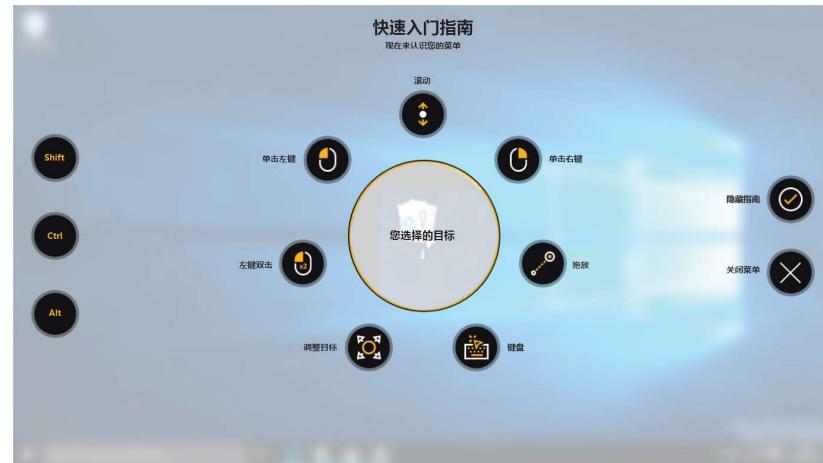

操作菜单

操作菜单中包含了各项鼠标动作，以及专门针对眼控而设计的屏幕键盘。
扫描下方二维码，观看相关指导视频。



操作鼠标




使用键盘

屏幕外菜单

当看向屏幕下方（如键盘或眼控仪的位置），屏幕外菜单就会打开。它包含了任务切换器、设置、暂停眼控，以及鼠标模式。



扫描二维码，观看相关指导视频

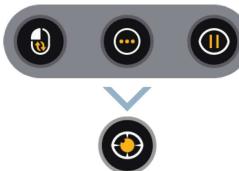

如果需要重新校准，打开屏幕外菜单，选择“更多”，然后选择“快速校准”。

使用TD Control的有用提示

- 需要休息眼睛时使用“暂停”。
- 无需将目标完美放置到追踪圈正中央，可使用“调整目标”进行微调。
- 使用滚动功能时，您注视的位置距离滚动图标越远，滚动速度越快。滚动功能适用于上下左右四个方向。
- 窗口切换器方便您切换应用窗口，您还可以将一些常用的应用固定在切换器上。

暂停
调整目标
窗口切换器



服务与支持

中国技术支持：
0512-69362880

工作时间：
周一至周五9: 30~16: 30
(节假日除外)

我们在此为您服务

扫描二维码，关注我们的公众号，获取更多信息

